

COVID-19 ISTRUZIONI USO DPI



MASCHERINA

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

- Lavare le mani prima di indossare il DPI.
- Note: Mascherine, guanti in lattice, tute e camici **DEVONO** essere gettati a fine attività (alla fine di ogni turno di misurazione temperatura) nel cestino dedicato.

COME INDOSSARE

- Fissare gli elastici al centro della testa e del collo
- Adattare la fascia flessibile sul ponte nasale
- Verificare il respiratore

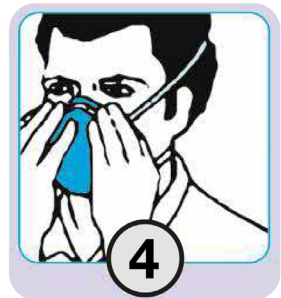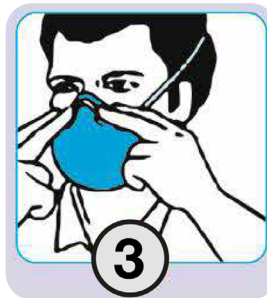

COME TOGLIERE

- Togliere i guanti prima di rimuovere la maschera
- La parte anteriore della maschera potrebbe essere contaminata.
NON TOCCARE
- Se le mani si contaminano durante la rimozione della maschera, lavarsi immediatamente le mani o usare un disinfettante per le mani
- Afferrare le fascette inferiori o gli elastici della maschera, rispetto a quelli in alto e rimuoverli senza toccare la parte anteriore
- Gettare in un cestino dedicato.